

RESPIRARE BENE IN OGNI MOMENTO

Prima di utilizzare i Breathe Right® Cerottini Nasali leggere attentamente queste istruzioni per l'uso. Per ulteriori informazioni chiedere al farmacista o al medico.

**Breathe
Right®**
CEROTTINI NASALI

1 Cosa sono e per cosa si usano i Breathe Right Cerottini Nasali?

I **Breathe Right Cerottini Nasali** sono costituiti da strisce elastiche che si sollevano e allargano delicatamente i passaggi nasali consentendo un miglior flusso d'aria.

I **Breathe Right Cerottini Nasali**, senza farmaci, aprono immediatamente i passaggi nasali favorendo la respirazione.

I **Breathe Right Cerottini Nasali** possono essere utilizzati di giorno o di notte per alleviare la congestione nasale dovuta ad allergie o raffreddore.

Utilizzare se si soffre di:

• Congestione nasale

I **Breathe Right Cerottini Nasali**, quando applicati, aprono le narici e aiutano a respirare meglio fornendo sollievo da congestione nasale e naso chiuso che possono essere causati da raffreddore e allergie.

I **Breathe Right Cerottini Nasali**, quando applicati, possono fornire sollievo dai sintomi di congestione o difficoltà respiratoria dovuta al setto nasale deviato. Non devono essere considerati un'alternativa all'eventuale correzione chirurgica definitiva.

• Russamento

Consentendo una respirazione più facile attraverso il naso anziché la bocca, i **Breathe Right Cerottini Nasali** possono aiutare a ridurre o anche eliminare il russamento. Per ottenere migliori risultati per alleviare il russare, si consiglia di usarli ogni notte.

I **Breathe Right Cerottini Nasali** possono essere utilizzati anche in caso di assunzione contemporanea di medicinali.

2 Come usare i Breathe Right Cerottini Nasali

Usa e getta - usare ogni cerottino solo una volta. Monouso. Possono essere utilizzati di giorno o di notte.

Una corretta applicazione garantisce un miglior risultato.

Fare attenzione a non posizionare il cerottino troppo in alto o troppo in basso.

È importante utilizzare cerottini di misura adatta al proprio naso per ottenere un miglior risultato. I cerottini nasali piccoli/medi si adattano al 75% dei nasi, mentre quelli grandi sono destinati agli adulti con nasi più grandi.

Le speciali strisce elastiche si sollevano allargando delicatamente i passaggi nasali.

Usare la variante trasparente per pelli secche/sensibili.

1




PULISCI
Lava e asciuga la pelle del naso per rimuovere sporco e grasso (usa un astringente per pulire la pelle grassa).

2



POSIZIONE
Rimuovi la pellicola protettiva e posiziona il cerottino sul naso.

3



APPLICA
Premi delicatamente e strofina il cerottino sulla pelle per fissarlo.

4

RIMUOVI
Rimuovi il Breathe Right Cerottino Nasale mentre lavi il viso con acqua calda o quando sei sotto la doccia. Rimuovi sempre lentamente il cerottino. Allenta le estremità, quindi solleva delicatamente il cerottino da entrambi i lati. Un'appropriata rimozione dei cerottini, con acqua calda, riduce la probabilità di reazioni cutanee o lesioni.

RESPIRARE BENE IN OGNI MOMENTO

Prima di utilizzare i **Breathe Right® Cerottini Nasali** leggere attentamente queste istruzioni per l'uso. Per ulteriori informazioni chiedere al farmacista o al medico.

**Breathe
Right®**
CEROTTINI NASALI

3 Per la tua sicurezza avvertenze e precauzioni

- Solo per uso esterno.
- Non usare su pelle ferita, scottata o irritata.
- In caso di eruzione cutanea o irritazione della pelle, interromperne l'uso.
- Non utilizzare per più di 12 ore al giorno.
- I cerottini sono esclusivamente monouso.
- Dopo la rimozione, l'adesivo perde adesività e il cerottino non rimane in posizione.
- **Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.**
- Non adatto ai bambini di età inferiore a 5 anni.
- In caso di dubbi sull'uso di questo prodotto, consultare il medico.

NON USARE

In caso di allergia ai **Breathe Right Cerottini Nasali**.

Apnea notturna: i **Breathe Right Cerottini Nasali** non sono destinati al trattamento dell'apnea notturna. Le persone che presentano sintomi di apnea notturna devono consultare il proprio medico.

Alcune persone possono manifestare reazioni avverse quando usano i **Breathe Right Cerottini Nasali**.

Queste possono essere reazioni in sede di applicazione (ad es. eritema, irritazione, dolore, esfoliazione, escoriazioni, sanguinamento, croste e alterazione del colore della pelle) e reazioni di ipersensibilità, tra cui eruzione cutanea, prurito e gonfiore facciale.

Si prega di segnalare qualsiasi incidente grave correlato a questo prodotto al fabbricante e Ministero della Salute (www.salute.gov.it)

È importante segnalare gli incidenti del prodotto in quanto ciò può aiutare a identificare eventuali difetti di questo dispositivo medico per impedire che incidenti simili si ripetano.

4 Come conservare i Breathe Right Cerottini Nasali?



Condizioni di conservazione: Non conservare a temperatura superiore a 30°C. Conservare nella confezione originale.

Nel rispetto dell'ambiente, smaltire secondo i requisiti locali.

Non usare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.

5 Ulteriori informazioni

I cerottini nasali sono confezionati singolarmente in involucri sigillati a freddo con adesivo. Gli involucri sigillati a freddo sono confezionati in scatole di cartone.

Per ottenere un risultato ottimale con i cerottini balsamici

I **Breathe Right Cerottini Nasali** con aromi balsamici sono rivestiti di capsule che contengono mentolo, eucalipto e canfora. Grattare la superficie per rilasciare i vapori mentolati calmanti; grattare di nuovo per riattivare.



Attenzione: prima di usare il prodotto leggere le istruzioni d'uso incluse



Non usare se la confezione è rotta o danneggiata



Monouso. I cerotti nasali sono monouso



Lotto: vedere cartone



Data di scadenza espressa in AAAA-MM



Foundation Consumer Brands, LLC, Pittsburgh, PA 15212, USA.



MDSS GmbH, Schiffgraben 41, Hannover 30175, Germany.



E.F.A.S. S.p.A., Via Malcantone n.3,
40011 Anzola dell'Emilia (BO), Italia.

Cartone: PAP 21
Volantino: PAP 22

www.breatheright.com



Dispositivo Medico
Data: gennaio 2026

Carta protettiva: PAP 22
Raccolta differenziata dei rifiuti.
Controlla le linee guida del
tuo comune.

Trademarks owned by FCB. © 2026 FCB.

012826
31058111